

傷寒糞便採檢棒使用說明

- 步驟 1. 糞便解在乾淨塑膠袋或乾淨白紙上 (不可使用坐式馬桶，否則糞便將受到馬桶水的污染)
- 步驟 2. 採檢棒外套打開，用手拿取棉枝的塑膠頭，取出棉棒 (注意手勿接觸棉棒的棉花及其他部位)。
- 步驟 3. 棉花部分沾裹糞便，直至棉花部分都沾裹到糞便
- 步驟 4. 採檢棒的白色塞頭拔掉，丟棄白色塞頭 (丟棄至垃圾桶，勿沖入馬桶)。
- 步驟 5. 棉棒放入採檢棒內，套緊。
- 步驟 6. 採檢棒外寫上姓名，以免和別人的檢體混淆。

